



O que deseja procurar?



HOME / PRODUTOS / ÁCIDO PERACÉTICO PERA-TEC 0,2% 5 LITROS



ÁCIDO PERACÉTICO PERA-TEC 0,2% 5 LITROS

MARCA: **TECPON**

REF: 2100007

EAN: 2100007

Esse produto não pode ser enviado pelos Correios, por favor selecionar uma transportadora.

NÃO DISPONÍVEL



Privacidade - Termos

Seu E-mail:

OK

Avise-me quando estiver disponível

DESCRIÇÃO

Referência: 6005330

Desinfetante de alto nível a base de Ácido Peracético. Por ser um produto pronto uso facilita a questão da NR 32 (Brasil, 2005) que volta-se exclusivamente para a segurança do trabalhador de serviços de saúde.

O PERA-TEC HOSP 0,2% evita o desperdício por acidentes e alguns riscos ocupacionais durante o manuseio do preparo da solução. Evitando assim também diluições inadequadas. Produto eficaz quanto aos seguintes microorganismos:

Staphylococcus aureus
Salmonella choleraesuis
Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa
Candida albicans
Trichophyton mentagrophytes
Bacillus subtilis
Clostridium sporogenes
Mycobacterium bovis
Mycobacterium smegmatis
Mycobacterium massiliense

MODO DE USAR:

Utilizar o produto puro em temperatura ambiente, entre 15°C e 25°C. Tempo de uso: trocar a solução a cada 30 dias, ou antes, se a concentração de ácido peracético estiver menor que 0,2%(2000 mg/L) medida por meio de fita teste específica para leitura de ácido peracético (Fita teste modelo Macherey – Nagel, Merck ou Specsol que será fornecido junto com o produto, ou poderá ser encontrada em lojas de reagentes de análises de produtos). Os materiais deverão estar completamente limpos e secos antes de imergi-los na solução. Depois de completado o tempo de 10 minutos, o material deverá ser enxaguado com água (conforme mencionado parágrafo único – Art. 68 da Resolução – RDC nº 15 de 15 de março de 2012), secá-los e utilizá-los imediatamente.

DESINFECÇÃO: Imergir totalmente os artigos, expondo as regiões críticas (articulações, ranhuras). No caso de artigos com canais internos, aspirar a solução, preenchendo os canais do instrumento. Tempo de contato: 10 minutos.

MANUSEIO: Manter a solução em uso em recipiente plástico tampado. Sempre utilizar EPI (equipamento de proteção



individual) padrão: protetor facial ou ocular, luvas plásticas (nitrílica, butílica ou de procedimento) e avental.

Medida de Pedido: Galão 5 litros

COMPOSIÇÃO QUÍMICA:

Peróxido de hidrogênio

Ácido Acético

Estabilizante

Veículo

Componente Ativo: * Ácido Peracético

Peróxido de Hidrogênio

Ácido Acético

PRECAUÇÕES:

- Antes de usar leia as instruções do rótulo;
- Conserve o produto fora do alcance das crianças e animais domésticos;
- Mantenha o produto em sua embalagem original e não reutilize a embalagem vazia;
- Ao utilizar o produto, use sempre EPI's (óculos e luvas);
- Evite o contato prolongado com a pele;
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância;
- Se ingerido, consultar de imediato o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde mais próximo.

Registro na ANVISA/ MS: 317800041

PRODUTOS RELACIONADOS






TECPON GOLD 5 LITROS

R\$ 96,20

R\$ 91,39 à vista com desconto Pix -
Vindi

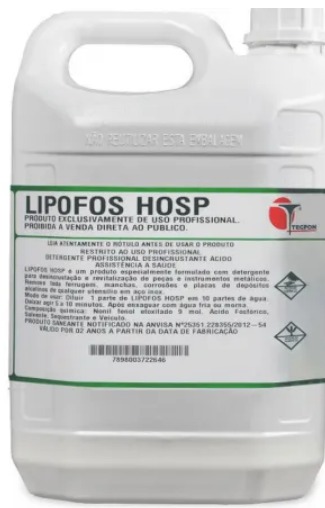

LIPOFOS HOSP REMOVEDOR DE
OXIDAÇÃO 5 LITROS

R\$ 184,90

R\$ 175,66 à vista com desconto Pix -
Vindi



LUCKZYME HOSP
ENZIMÁTICO 5 LITROS

R\$ 249,90

R\$ 237,22 à vista com desconto Pix -
Vindi



OS MELHORES PRODUTOS
das melhores marcas

CADASTRE-SE E RECEBA OFERTAS COM PREÇOS EXCLUSIVOS

seja sempre o primeiro a receber nossas novidades, cadastre-se, é grátis!


[Digite seu e-mail](#)

OK >

INSTITUCIONAL

FALE CONOSCO

PAGAMENTO

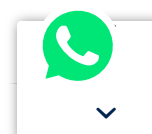

COMPRA SEGURA



© 2024 Max Medical - Todos os direitos reservados

TECNOLOGIA **TRAYCOMMERCE**

